



Instrukcja Obsługi Użytkownika



IP67



Symbol zastosowanej części typu B wskazujący, że powierzchnia produktu jest określona jako zastosowana część typu B pod ISO60601-1.

temperatura robocza: 0°C to 35°C

Temperatura przechowywania: -10°C to 45°C

Made in Ireland for:



The Realtime Building,
Clonsaugh Business &
Technology Park,
Dublin, D17 H262 Ireland

Importer z USA:

Shimmer Research Inc.
82 Wendell Avenue, STE
100, Pittsfield, MA 01201
USA



FCC ID: 2AA9B10


FDA ID: Shimmer Research Inc: SHI72409

FDA ID: Shimmer Research Ltd: SHI87507




Jak korzystać z urządzenia Verisense IMU Sensor


Urządzenie Verisense IMU należy nosić na nadgarstku reki niedominującej.

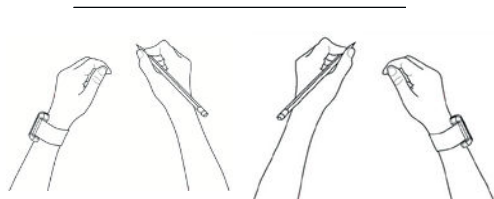

Gniazdo USB powinno być skierowane do zewnątrz w kierunku dłoni.

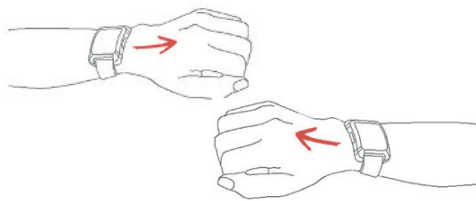

Urządzenie powinno być dobrze dopasowane do nadgarstka.

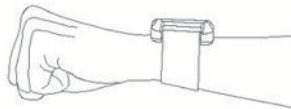

Zapamiętaj...

Urządzenie Verisense IMU musi znajdować się na nadgarstku przez cały czas.



Przewidywana żywotność baterii wynosi sześć miesięcy.- ładowanie urządzenia nie jest wymagane.



Rozmieszczenie Stacji Bazowej

Stacja bazowa powinna być podłączona do stałego źródła zasilania.



Stacja bazowa powinna być podłączona do sieci lokalnej WIFI lub sieci komórkowej.



Stacja bazowa powinna znajdować się w pomieszczeniu, w którym użytkownik spędza przynajmniej godzinę dziennie.

